

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/activon-tube-leczniczy-miod-manuka-w-tubce-25g-p-267.html>



Activon Tube Leczniczy Miód Manuka w Tubce 25g

Cena brutto	27,50 zł
Cena netto	25,46 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Tubka Activon Tube:

zawiera 25 g czystego miodu Manuka o właściwościach leczniczych i antybakteryjnych. Dzięki swoim właściwościom miód Manuka zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi w przypadku infekcji rany oraz zapewnia odpowiedni poziom wilgoci w obrębie rany, co w zdecydowanym stopniu wpływa na szybkość jej gojenia się.



Wskazania:

Activon może być stosowany na każdy rodzaj rany, w szczególności na rany martwicze i rany o nieprzyjemnym zapachu, w tym:

- Owrzodzenia kończyn
- Odleżyny
- Rany chirurgiczne
- Oparzenia
- Przeszczepy miejscowe

Sposób użycia:

Nałożyć środek bezpośrednio na ranę lub użyć w połączeniu z Activon Tulle lub Algivon aby zwiększyć koncentrację miodu. Ranę można pokryć dodatkowym opatrunkiem według uznania, stosując na przykład chłonny kompres lub folię poliuretanową. Poprzez odwrócenie zakrętki jest możliwe zatkanie tubki na czas wykonywania opatrunku.

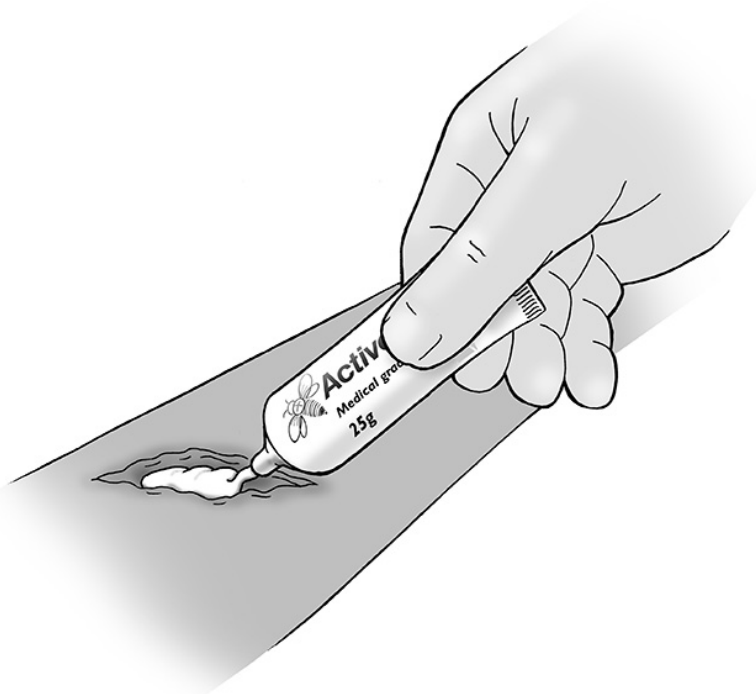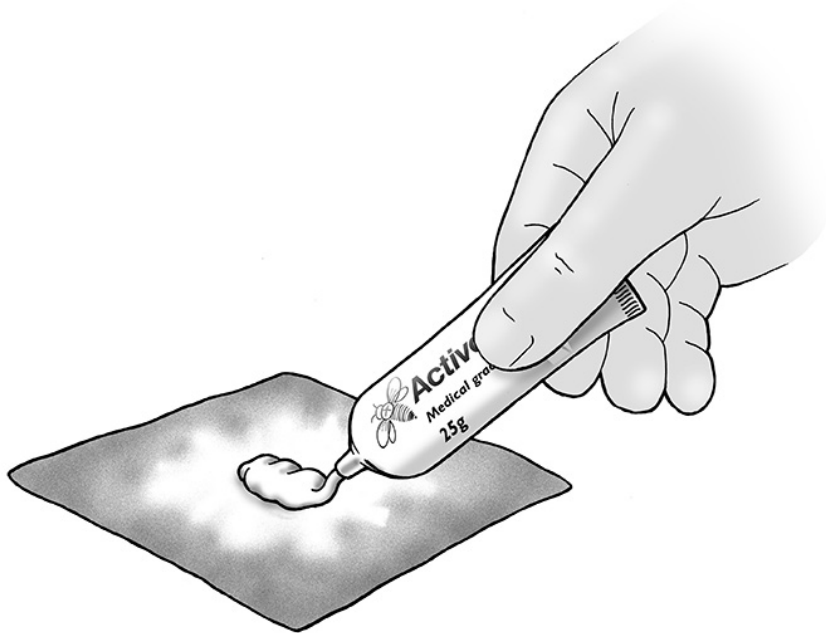

Cechy:

.

Antybakteryjny

Antybakteryjna aktywność miodu wiąże się głównie z działaniem nadtlenku wodoru, powstającego pod wpływem zawartego w miodzie enzymu – oksydazy glukozy.

.

Efekt osmotyczny

.

Miód jako substancja o wysokiej osmolarności odprowadza nadmiar wody, co zapobiega maceracji brzegów rany i nadmiernemu gromadzeniu się aktywnych substancji w środowisku rany. Co więcej, pobudza on procesy jej autolitycznego oczyszczania i hamuje wzrost bakteryjny.

.

Szybsze gojenie się rany

Miód bogaty w rozpuszczalne w wodzie przeciwutleniacze korzystnie wpływa na pobudzanie procesów granulacji i epitelializacji.

.

Redukcja nieprzyjemnego zapachu z rany

W przypadku ran o nieprzyjemnym zapachu, zastosowanie opatrunków z miodem ogranicza tę przykrą cechę.

A.M.