

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/koc-ratunkowy-termiczny-p-25.html>



Koc ratunkowy - termiczny

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,94 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

KOC RATUNKOWY:

chroni przed groźną dla życia utratą ciepła, przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (deszczem, wilgocią). Sygnalizuje, że osoba nim przykryta wymaga pomocy.

SPOSÓB UŻYCIA:

Koc rozłożyć na całą szerokość. Dokładnie owinąć nim poszkodowanego końce zlepić taśmą, plastrem lub zawiązać. Twarz musi być odkryta!

- jeżeli jest zimno należy rannego okryć srebrną powierzchnią do ciała
- jeżeli jest gorąco należy okryć rannego złotą powierzchnią do ciała

Koc nie może być stosowany w przypadku gdy osoba nim przykryta ma kontakt z urządzeniami lub mediami znajdującymi się pod napięciem elektrycznym.

- Złotym do góry chroniąc przed wyziębieniem
- Złotym do dołu chroniąc przed przegrzaniem

wymiar : 210 x 160 cm

kolor : srebrno/złoty