

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/bandaz-kohezyjny-elastyczny-samoprzylepny-7-5cm-x-4-5m-czarny-p-407.html>



Bandaż kohezyjny Elastyczny Samoprzylepny 7,5cm x 4,5m CZARNY

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,94 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Bandaż Elastyczny Samoprzylepny 7,5cm x 4,5m

.

Charakterystyka:

- Jednowarstwowa, włókninowa opaska
- Kohezyjna – przyczepi się sama do siebie (nie ma potrzeby stosowania zapinek), nie przyczepia się do skóry, włosów itp.
- Oddychająca
- Opaska nie posiada właściwości leczniczych, jest produktem wspomagającym proces leczenia
- Może być dzielona na mniejsze odcinki, możliwość rozerwania w rękach, nie ma potrzeby używania nożyczek
- Dostępna w kilku kolorach
- Opakowana w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem, odwinieciem i zawilgoceniem, na foli nadrukowane są niezbędne informacje dotyczące produktu
- Nie zawiera lateksu
- Produkt niejałowy

.

Zastosowanie:

- Mocowanie opatrunku, zwłaszcza w miejscach, w których
- tradycyjny bandaż mógłby się zsuwać
- Mocowanie szyn unieruchamiających
- Tworzenie opatrunku kompresyjnego

-
- Zmniejszanie zakresu ruchu stawów po urazie

Instrukcja użycia:

1. Miejsce aplikacji powinno być oczyszczone i osuszone.
2. Należy odpowiednio dobrać rozmiar bandaża do miejsca aplikacji.
3. Opatrunek pierwotny, który bandaż ma podtrzymywać powinien być założony bezpośrednio na ranę zgodnie z zasadami aseptyki. Jeśli bandaż nie jest wykorzystywany do podtrzymania opatrunku należy pominąć ten punkt.
4. Wyjąć bandaż z opakowania.
5. Założyć bandaż na miejscu docelowym tak, aby jego kolejne warstwy zachodziły na siebie, co pozwoli na utrzymywanie się bandaża poprzez działanie kohezyjne.
6. Jeśli bandaż jest zbyt długi, należy przyciąć go do pożądanej długości.
7. Wolny koniec bandaża należy docisnąć palcami do poprzednich warstw opatrunku, upewniając się, że przylegają do siebie i tworzą bezpieczne połączenie.
8. Skontrolować, czy opatrunek nie uciska zbyt mocno i nie pojawiają się cechy niedokrwienia takie jak błądź, czy zasinienie.
9. Bandaż powinien być zmieniany zgodnie z instrukcją dla opatrunku pierwotnego.
10. Jeśli opatrunek nie służy do przytrzymywania opatrunku jałowego, powinien być zmieniony kiedy ulegnie uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nie rzadziej niż codziennie.