

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/opatrunek-hemostatyczny-guardacare-pro-5-x-40-cm-p-334.html>



Opatrunek hemostatyczny GuardaCare PRO 5 x 40 cm

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	69,44 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Opatrunek hemostatyczny GuardaCare PRO 5x5 cm - 8 warstw

Wymiary po rozłożeniu: 5 x 40 cm

HemCon GuardaCare® PRO to hemostatyczny opatrunek do zewnętrznego, okresowego tamowania ostrych krwotoków z ran.

Instrukcja obsługi:

1. Otworzyć foliowa saszetkę i wyjąć opatrunek
2. Zlokalizować źródło krwawienia i umieścić cały opatrunek w lub na ranie. Upewnić się, że pokryta została rana oraz wszystkie krwawiące powierzchnie.
3. Uciskać do momentu zatamowania krwawienia.
4. Po zatamowaniu krwawienia zabezpieczyć opatrunek GuardaCare przy pomocy odpowiedniego opatrunku.